

2. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. К эксплуатации облучателя-рециркулятора допускаются преподаватели и работники не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.

2.2. Запрещается:

2.2.1. Проводить ремонт и обслуживание рециркулятора включенного в сеть;

2.2.2. Включать облучатель при снятой крышке;

2.2.3. Устанавливать и вынимать штепсельную вилку мокрыми руками;

2.2.4. Натягивать и перекручивать сетевой шнур.

2.3. Облучатель-рециркулятор может работать в присутствии людей непрерывно в течение всего времени, необходимого для поддержания степени чистоты воздуха.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1. Перед проведением проверки рециркулятора необходимо произвести внешний осмотр на отсутствие внешних механических повреждений.

3.2. Проверка целостности сетевого шнура.

3.3. В журнале регистрации и контроля бактерицидной установки проставить дату, время включения и время выключения.

Разработал:
Проректор по АХР
А.В. Копейкин 8(495)911-92-98